

この取扱説明書は使用前に必ずお読みください。また必要に応じて読むよう、大切に保管してください。

**警告**

- 使用前に必ず、コントロール液ボトルを15回ほど振ってよく混ぜて使用ください。
- 攪拌が不十分な場合は、不正確な結果を引き起こす可能性があります。
- コントロール液の結果で使用中の連続血糖測定器の校正をしないでください。
- コントロール液の結果に基づいて、ボラスを計算しないでください。

【使用目的】コントアネクスト®コントロール液は、一定量のグルコースを含有する水溶液で、品質管理チェック用に使用します。

【コントロールテストの推奨実施タイミング】

- 初めて測定器を使用するとき。
- 新しいボトルまたはセンサーのパッケージを開けて使用するとき。
- 測定器が正常に機能していないと思われるとき。
- 繰返しの血糖測定で、予想外の結果になるとき。

【保存及び取扱い】

9°C ~ 30°C • 9°C~30°Cで保存してください。

- 測定器あるいはセンサーを別の場所に移動した場合は、コントロールテストを実施する前に移動場所の温度に20分以上なじませてください。コントアネクスト®のコントロールテストは、15°C~35°Cの温度範囲で行ってください。
- ボトルラベルと包装箱に印刷されている使用期限を過ぎていたり、開封後6ヶ月を過ぎているコントロール液は絶対に使用しないでください。開封時には、6ヶ月後の使用可能期限をボトルラベルに記入してください。
- 使用済みのコントロール液は、お住まいの地域の分別/廃棄ルールに従って適切に処分してください。

【テスト手順】コントロールテストの詳細な手順についてはコントアネクスト®測定器の取扱説明書をよく読んでください。



- 使用前に必ず、コントロール液ボトルを15回ほど振ってよく混ぜて使用ください。
- 攪拌が不十分な場合は、不正確な結果を引き起こす可能性があります。

1. 必ずテスト前に、使用期限と使用可能期限を確認してください。
2. コントアネクスト®には本品を使用してください。他のコントロール液を使用すると、正しく測定できません。
3. 使用前に必ず、コントロール液ボトルを15回ほど振ってよく混ぜてください。
4. ボトルキャップを外し、ボトルの先端に付着している液をティッシュペーパー等で拭き取ってください。
5. コントロール液を、清潔な食品用アルミ箔やラップフィルムなどに滴下してください。コントロール液を指先に滴下したり、ボトルから直接点着したりしないでください。
6. コントロール液を滴下後、すみやかにセンサー先端を接触させてください。
7. 測定器から「ピー」と音が鳴るまでセンサー先端をコントロール液に当てておいてください。
8. 使用済みのセンサーは医療廃棄物として、または医療関係者のアドバイスに従って処分してください。

【テスト結果】コントロールテスト結果とセンサーボトルラベルまたは包装箱に記載されている管理範囲 CONTROL を比較してください。

【テスト結果が管理範囲にはまらない場合】テスト結果が、センサーボトルラベルや包装箱に記載されている管理範囲 CONTROL に収まらない場合、センサー、測定器あるいはテスト手法に問題があると考えられます。問題が解決されるまで、その測定器とセンサーを使用しないでください。

【重要】問題が解決しない場合は糖尿病検査お問い合わせコーナーにご連絡ください。



安全上の注意

- コントアネクスト®コントロール液はここに記載されている用途以外では使用しないでください。
- コントロール液は飲んだり注射したり点眼したりしないでください。

	グルコース (% w/v)	不活性物質 (% w/v)
【組成】 Normal (正常域)	0.07	99.93
Low (低値域)	0.03	99.97
High (高値域)	0.18	99.82

【お問い合わせ先】

PHC株式会社

〒105-8433 東京都港区西新橋2-38-5

糖尿病検査 お問い合わせコーナー  
**0120-123-119**  
9:00~17:30 (土・日・祝日、弊社休日を除く)

原産国：米国



使用前に振ってください

